

schülke -+



Alcoholvrije sneldesinfectie van Medische hulpmiddelen en algemene oppervlakken op basis van Quaternaire ammoniumverbindingen in sproeivloeistof en tissues.

mikrozid® sensitive tissues

Onze pluspunten

- alcoholvrij
- snel en breed werkingsspectrum
- geschikt voor alcoholgevoelige oppervlakken
- gebruiksklaar
- als biocide genotificeerd bij het Ctgb

Toepassingen

Voor de desinfectie van medische hulpmiddelen en toebehoren [CE 0297] en algemene oppervlakken. Bijzonder geschikt voor alcoholgevoelige oppervlakken (waaronder plexiglas en ultrasoon toebehoren).

Microbiologische werkzaamheid

- bacteriën
- schimmels
- virussen (waaronder HIV, HBV, rota, vaccinia)

Werkzaamheid	Inwerktijd
- bactericide – schimmels (volgens VAH-/DGHM-richtlijnen bij verkorte inwerktijden)	1 min.
Beperkt virucide* (incl. HIV, HBV, HCV)	1 min.
BVDV	1 min.
Rotavirus	1 min.
Vaccinia	1 min.
Polyoma SV40 (alleen sensitive liquid)	5 min.

* Overeenkomstig RKI-aanbeveling Bundesgesundheitsblatt 01/2004

Productgegevens

Samenstelling mikrozid® sensitive tissues:
100g vloeistof bevat: 0.26g Benzyl-C12-18-alkyldimethylammonium Chloride, 0.26g Didecyldimethylammonium Chloride, 0.26g C12-14-Alkyl [(ethylphenyl) methyl] dimethylammonium, Chloride.

Chemisch-fysische gegevens:

Uiterlijk:	Helder, kleurloze vloeistof
densiteit:	ca. 0.998g/ml
viscositeit:	<15 s.(DIN 53 211)
temp. Stabiliteit:	-5°C tot +40°C
pH waarde (20°C):	ca. 6.0 – 8.0
vlampunt (tissues):	<61°C (DIN 51 755)

Dosering en gebruik

Mikrozid® sensitive tissues gebruiken om oppervlakken af te nemen daarbij de aangegeven inwerktijd aanhouden. Voor gebruik op grote oppervlakken eventueel meerdere tissues gebruiken.

Product / Accessoires

Product / Accessoires	Eenheid	Art. No.
mikrozid® sensitive tissues	bussen	165706
mikrozid® sensitive tissues	refill	165707

mikrozid[®] sensitive tissues

Bijzondere opmerkingen

Het dragen van handschoenen wordt aanbevolen.

Milieu

Schülke producten worden vervaardigd onder vooruitstrevende, veilige, spaarzame en milieuvriendelijke omstandigheden. Wij houden hoge kwaliteitseisen in acht.

Rapporten in informatie

Een overzicht van alle rapporten en literatuur betreffende de mikrozid[®] sensitive producten is terug te vinden op internet via website www.schuelke.com

Voor individuele vragen kunt u zich wenden tot ons Benelux kantoor: 0031 (0)23 535 26 34.

Wetgeving in Nederland

Mikrozid[®] sensitive tissues is genotificeerd als PT2 product (desinfecterende middelen voor privé gebruik en voor openbare gezondheidszorg en andere biociden) bij het Ctgb in Wageningen (College voor toelating Bestrijdingsmiddelen) conform publicatie in de Staatscourant nr. 55 van 20 maart 2009 aangaande nieuw beleid voor biociden.



Schülke & Mayr heeft het certificaat van DIN EN ISO 9001 en DIN EN 46001 (reg.-nr 45601) en heeft een goedgekeurd systeem van milieubeheer in overeenstemming met de Verordening op de Eco-Controle (reg.-nr DE-S-150 00003).



Schülke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt, Germany
Phone +49 (0) 40 - 521 00 - 0
Fax +49 (0) 40 - 521 00 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Schülke & Mayr Benelux BV
Prins Bernhardlaan 2c
2032 HA Haarlem
Tel: +31 (0) 23 535 26 34
Fax: +31 (0) 23 536 79 70

Schülke & Mayr Belgium NV
Beaulieustraat 4
B-1830 Machelen
Tel: +32 (02) 479 73 35
Fax: +32 (02) 479 99 66